

OPERACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DETERGENTE

【NOMBRE】 Detergente

【MODELO】 URIT D41

【ESTADO MICROBIOLÓGICO】 No aplica

【USO PREVISTO】

El producto tiene la función de limpieza, y tiene un efecto importante en el diagnóstico clínico.

【RESTRICCIÓN, PRECAUCIONES Y NOTAS】

1. Use el detergente bajo la dirección de un profesional.
2. Este producto no debe consumirse, si es así, consulte de inmediato a un médico.
3. Evite contacto con la piel y ojos. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con abundante agua y busque atención médica.
4. Tratar los residuos de acuerdo con las normativas locales.

【COMPUESTOS】

Cloruro de sodio, Sulfato de sodio, Solución Buffer y Surfactante.

【ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL】

Este producto será estable durante 24 meses sin abrir y siempre y cuando se almacene a una temperatura entre 2°C - 40°C, sin exponer a la luz solar. Una vez abierto el producto, se debe consumir dentro de los 60 días y almacenarse a una temperatura entre 15°C - 30°C.

【APLICACIONES】

Este producto es usado para analizadores de hematología automatizados marca URIT.

【MUESTRAS DE SANGRE】

1. Las muestras de sangre deben ser venosas o capilares, recogidas con anticoagulante EDTA-K2. No se pueden medir muestras hemolizadas, con lipemia o coaguladas.
2. Las muestras de sangre deben almacenarse a una temperatura entre 2°C- 8°C.

【PROCEDIMIENTO OPERACIONAL】

1. Introduzca la manguera de entrada del diluyente en el reactivo, extraiga el aire del envase y ajuste la tapa. Haga clic en cambiar en la interfaz de mantenimiento. Luego realice el background en la interfaz de conteo y asegúrese de que el valor del blanco cumpla con los estándares.
2. Coloque el reactivo debajo del equipo.
3. Evitar la luz solar, manténgalo alejado de la salida del aire acondicionado o calefacción, use el reactivo a una temperatura entre 15°C hasta 30°C

【CONTROL AL PRODUCTO】

1. **Valor pH:** 7.40 ± 0.30 a una temperatura de referencia $25^{\circ}\text{C} \pm 1$
2. **Valor de blanco:** $\text{WBC} \leq 0.3 \text{Xx/L}$, $\text{RBC} \leq 0.05 \text{Xx/L}$, $\text{PLT} \leq 10 \times 10^9/\text{L}$, $\text{HGB} \leq 2 \text{g/L}$
3. **Diferencias entre lotes:** ΔPH values ≤ 0.60

【RESULTADOS DE LA PRUEBA】

1. Para los resultados de la prueba, consúltelos en los valores del rango normal.
2. Si el resultado de la prueba está por fuera del rango de los valores de referencia, los resultados se marcarán con la letra L o H. Si el resultado es la letra L, significa que está por debajo del límite inferior. Si el resultado es la letra H, nos indica que el resultado es superior al límite superior.

【CAMBIOS EN LOS PROCESOS Y DESEMPEÑO】

1. Ajustar la tapa del envase para evitar la volatilización y la contaminación del producto. Desechar los restos del producto después de 60 días de uso.

2. Si el reactivo se ha congelado, deje que se caliente a temperatura ambiente y luego mezcle suavemente. Verifique los resultados del background antes de usar el producto.
3. Tenga en cuenta que el reactivo debe coincidir con el modelo del equipo. Por favor no utilice otro reactivo producido por otra empresa, de lo contrario puede causar errores en la medición.

【CONTROL DE CALIDAD AL PROCESO】

Seleccionar tres unidades de producto en cada lote de producción, se recomienda tomar la primera caja y la última caja en el proceso de fabricación.

El lote de producción no será aprobado, si alguna unidad de producción no cumple con los estándares de inspección.

【Fecha de Producción】 Consultar en la caja o Etiqueta

【Durabilidad】 Consultar en la caja o etiqueta

【Control de calidad y trazabilidad de calibradores】 No Aplica

【RANGOS DE REFERENCIAS】 No Aplica

【REFERENCIAS】

1. Cong Yulong, Editor, Equipo de Laboratorio Clínico, tercer volumen, Reactivos y consumibles, Wy Beijing, Science Press, 2016.4
2. Zhao Guizhi, Ciencia de Laboratorio Clínico Chengdu: Sichuan prensa de Ciencia y Tecnología, 1999.05.

D41



LABTRONICS S.A.S

Fábrica: Calle 182 No. 7-51 Loc. 3
Oficina: Calle 101A 47A-09
Tel. 571-6354327-28 Bogotá D.C., Colombia
Web: www.labtronics.net
Email: labtronics@labtronics.net

Autorizado por:

URIT Medical Electronic Co., Ltd.

No. D-07 Information Industry District, High - Tech Zone,
Guilin, Guangxi 541004, P.R.China.
Tel:+86(773)2288586 Fax:+86(773)2288560
Web:www.urit.com Email:service@uritest.com